

遗体解剖清洗台产品说明书

产品概述

遗体解剖清洗台是一款专为医学研究、法医解剖及公安部门设计的高端设备，旨在为操作人员提供安全、高效、舒适的工作环境。该设备采用优质不锈钢材料，具备耐腐蚀、抗老化、坚固耐用等特性，适合长时间使用。其独特的功能设计能够有效改善解剖室内的空气质量，简化清洗流程，提升工作效率。

技术参数

外形尺寸：长 2550mm × 宽 860mm × 高 850mm

型号：HT-JPT-24A

材质：SUS304 优质不锈钢，厚度 1.5mm

耐腐蚀性：具备优良的耐腐蚀和抗老化性能，确保长期使用不变形。

重量：约 150kg（具体重量以实际产品为准）

电源要求：220V/50Hz（根据具体型号调整）

水压要求：0.2-0.6MPa

风机功率：133W

风机噪音：若当 52 分贝、强档 61 分贝

粉碎机功率：370W

主要功能及特点

1. 内置风机抽风系统

功能描述：设备内置高效风机，能够将解剖过程中产生的有害气体

体和异味从台面下方抽出，并通过排气管道排出室外。

设计特点：抽风口位于台面内侧两边，采用向下抽风方式，确保有害气体被及时排出，避免扩散到操作环境中。

优势：显著改善操作人员的工作条件，降低职业危害，符合环保和健康安全标准。

2. 超长、超宽台面设计

功能描述：台面尺寸为 2550mm × 860mm，提供充足的操作空间，适合进行复杂的解剖工作。

设计特点：台面边缘采用弧形设计，避免尖锐棱角，确保操作安全。

优势：为操作人员提供更大的工作区域，提高解剖效率和舒适度。

3. 便捷的清洗系统

功能描述：水槽下方配备冷热水龙头和摆动式水嘴，支持快速切换冷热水模式，方便清洗和消毒。

设计特点：配备伸缩式高压水枪，伸缩范围为 2.5-3 米，可轻松清洗台面及台面下的污物。

优势：高压水枪设计能够有效清除顽固污渍，减少清洗时间，提高工作效率。

4. 台面气缸支撑设计

功能描述：解剖台面采用气缸支撑结构，操作人员可通过控制按钮轻松抬起台面，以便清理台面下的杂物。

设计特点：气缸支撑系统稳定可靠，台面抬起角度可调，方便操

作。

优势：简化台面下区域的清洁工作，确保设备长期保持卫生状态。

5. 内置粉碎机

功能描述：设备内置高效粉碎机，能够将解剖过程中产生的大块物体粉碎成细小颗粒，避免堵塞污水管道。

设计特点：粉碎机采用不锈钢刀片，耐腐蚀且易于清洁。

优势：有效防止管道堵塞，降低维护成本，确保排水系统畅通。

6. 排水系统

功能描述：台面下方配备高效排水系统，能够快速排出清洗过程中产生的污水。

设计特点：排水口采用防堵塞设计，确保污水顺利排出。

优势：提高清洗效率，保持工作环境清洁。

适用范围

该遗体解剖清洗台广泛适用于以下场所：

医院解剖室

法医实验室

公安部门尸体解剖室

医学研究机构

医学院校教学实验室

安全注意事项

电源安全：

使用前请检查电源线路是否完好，避免漏电风险。

清洗设备时，请务必切断电源，确保操作安全。

水压控制：

使用高压水枪时，请确保水压在 0.2-0.6MPa 范围内，避免损坏设备。

定期维护：

定期检查风机、粉碎机及排水系统，确保其正常运转。

清洁设备时，请使用中性清洁剂，避免使用腐蚀性化学品。

操作规范：

操作人员应接受专业培训，熟悉设备的使用方法和安全规范。

解剖过程中产生的废弃物应按照规定妥善处理。

维护与保养

日常清洁：

每次使用后，请及时清洗台面及水槽，保持设备清洁。

定期检查抽风系统和粉碎机，清除积存的污物。

定期检查：

每月检查一次气缸支撑系统，确保其运行平稳。

每季度检查一次电源线路和水管连接，确保无漏电或漏水现象。

长期停用：

若设备长期停用，请切断电源并排空水管内的存水，避免设备生锈或损坏。

售后服务

我们提供完善的售后服务，产品质保期为 3 年。在质保期内，如产品出现质量问题，我们将免费维修或更换；质保期后，我们仍将提供有偿的维修和保养服务，确保产品长期正常使用。如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您服务。

我们本着“用户满意”的服务宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，我公司设立 24 小时售后服务电话：

0631-3850232 19963188981，我们将给予您满意的答复。